


VAGINITIS

Instructie voor vaginale afname | vaginitis.
Lees deze instructie goed!

1 Dit heb je nodig

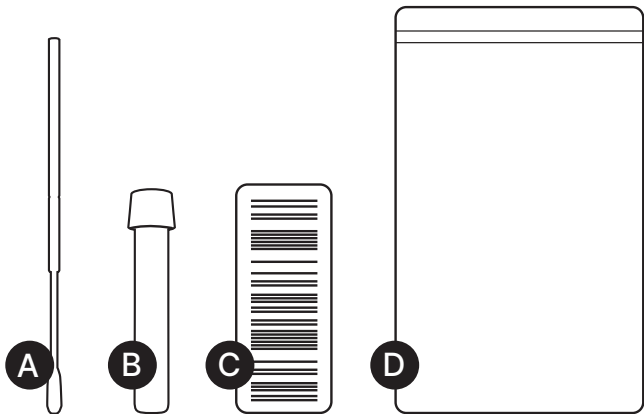


A. Wattenstaaf
B. Testbuis

C. Barcode sticker
D. Safety bag

VAGINITIS

Instructie voor vaginale afname | vaginitis.
Lees deze instructie goed!

2 Zo doe je de test

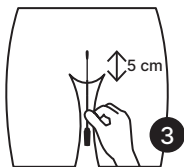

1. Pak de korte oranje buis met witte dop. Besticker het met de **roze sticker** voor **vaginale afname**.
2. Haal de wattenstaaf uit de verpakking en neem deze tussen duim en wijsvinger vast. Open alvast de buis en bewaar de dop goed.
3. Breng de wattenstaaf ongeveer 5 centimeter in de vagina en strijk daarmee gedurende 30 seconden langs de vaginawand.
4. Plaats de wattenstaaf in de buis en breek af op het afbreekpunt. De wattenstaaf blijft achter in de buis. Draai daarna de dop vast.
5. Controleer nogmaals of de buis de juiste sticker bevat. Plaats daarna de buis in de bijgevoegde safety bag. Sluit deze nog niet indien je meerdere samples wilt toevoegen.