


HUIDSCHIMMEL

Instructie voor huidschimmel afname.
Lees deze instructie goed!

1 Dit heb je nodig

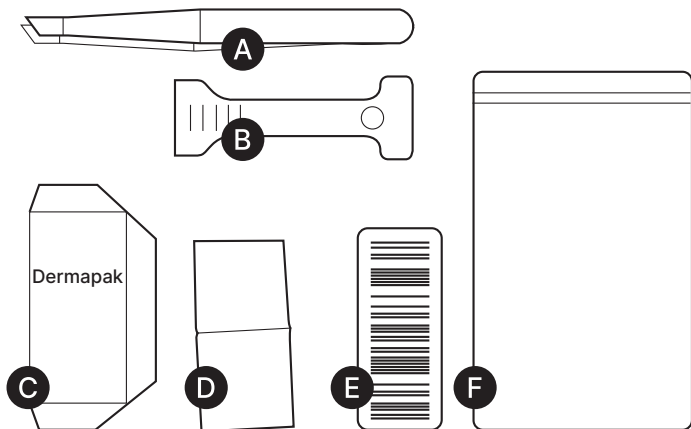

- A. Pincet (*niet inbegrepen*)
- B. Plastic krabbertje
- C. Dermapak

- D. Alcoholgasje
- E. Barcode sticker
- F. Safety bag

HUIDSCHIMMEL

Instructie voor huidschimmel afname.

Lees deze instructie goed!

2 Zo doe je de test

1. Pak de “dermapak” en besticker het met de **lichtroze sticker** waarop staat: **huid afname | huidschimmel**.
2. Dep nu de aangedane huid schoon met het alcoholgaasje, mits de huid intact is.
3. Leg de dermapak op een vlakke ondergrond en vouw de transparante plastic flap helemaal open.
4. Schraap vervolgens met het plastic krabbertje langs de aangedane huid, op de overgang naar normale huid. Zorg dat je de direct loskomende huidschilfers opvangt op het zwarte papier van de dermapak. Het is ook mogelijk om een pincet te gebruiken in geval van grovere huidschilfers. Enkele huidschilfers zijn voldoende.
5. Plak vervolgens de randen van de dermapak dicht.
6. Controleer nogmaals of de dermapak de juiste sticker bevat. Plaats daarna de dermapak in de bijgevoegde transportverpakking. Ga eventueel door naar de volgende afname.