


HAAR

Instructie voor haar afname.
Lees deze instructie goed!

1 Dit heb je nodig

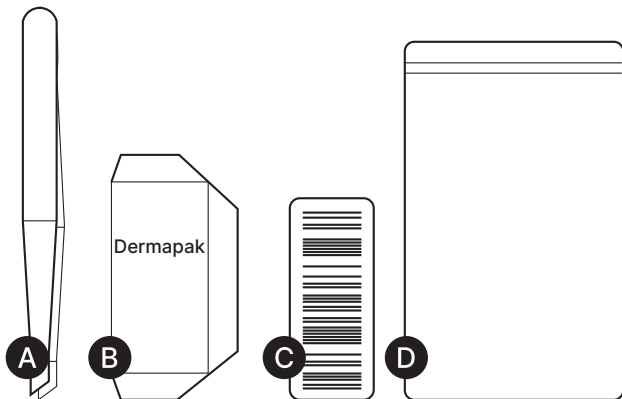

- A. Pincet
(niet inbegrepen)
- B. Dermapak

- C. Barcode sticker
- D. Safety bag

HAAR

Instructie voor haar afname.

Lees deze instructie goed!

2 Zo doe je de test

1. Pak het plastic opvangzakje “dermapak” en besticker het met de **bruine sticker** waarop staat: **haar**.
2. Zoek het aangedane gebied op en trek vervolgens met een pincet een aantal haren uit dit gebied met de wortel los uit de huid. Plaats deze haren in de dermapak.
3. Plak de randen van de dermapak dicht.
4. Controleer nogmaals of de dermapak de juiste sticker bevat. Plaats daarna de dermapak in de bijgevoegde transportverpakking. Ga eventueel door naar de volgende afname.