


NAGEL

Instructie voor nagel afdame.
Lees deze instructie goed!

1 Dit heb je nodig

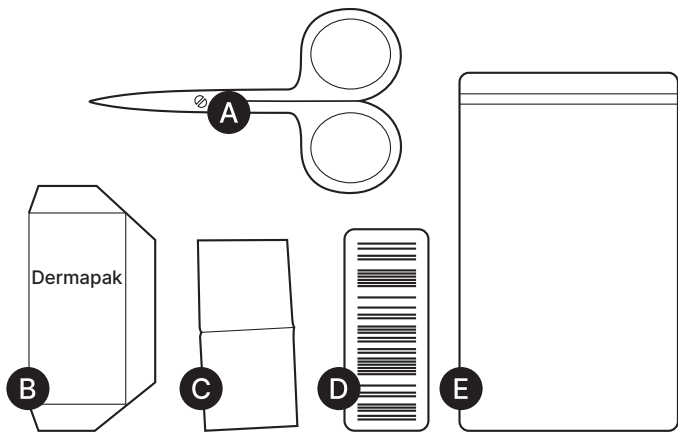

- A. Nagelschaartje
(niet inbegrepen)
- B. Dermapak

- C. Alcoholgaasje
- D. Barcode sticker
- E. Safety bag

NAGEL

Instructie voor nagel afname.
Lees deze instructie goed!

2 Zo doe je de test

1. Pak het plastic opvangzakje “dermapak” en besticker het met de **oranje sticker** waarop staat: **nagel**.
2. Dep de aangedane nagel schoon met het alcoholgaasje.
3. Knip nu met een nagelschaartje een rand af van de aangedane nagel, bij voorkeur op de overgang van aangedane naar gezonde nagel. Plaats de nagel vervolgens in de dermapak.
4. Plak de randen van de dermapak dicht.
5. Controleer nogmaals of de dermapak de juiste sticker bevat. Plaats daarna de dermapak in de bijgevoegde transportverpakking. Ga eventueel door naar de volgende afname.