


# VAGINALE AFNAME

Instructie voor vaginale afname.  
Lees deze instructie goed!

## 1 Dit heb je nodig

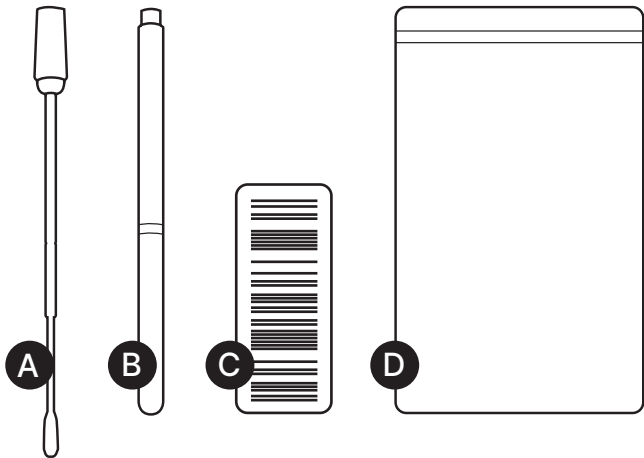


A. Wattenstaaf  
B. Testbuis

C. Barcode sticker  
D. Safety bag

# VAGINALE AFNAME

Instructie voor vaginale afname.  
Lees deze instructie goed!

## 2 Zo doe je de test

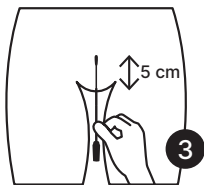

1. Pak de lange buis met rode dop. Besticker het met de **roze sticker** voor **vaginale afname**.
2. Draai de dop van de buis en neem de wattenstaaf (*die vastzit aan de dop*) tussen duim en wijsvinger. Plaats de buis in de houder.
3. Breng de wattenstaaf ongeveer 5 centimeter in de vagina en strijk daarmee gedurende 30 seconden langs de vaginawand.
4. Plaats de wattenstaaf terug in de buis en klik de dop vast.
5. Controleer nogmaals of de buis de juiste sticker bevat. Plaats daarna de buis in de bijgevoegde safety bag. Sluit deze nog niet indien je meerdere samples wil toevoegen.