

URINE AFNAME

Instructie voor urine afname.
Lees deze instructie goed!

1 Dit heb je nodig



- A. Spuitje voor de urine
- B. Opzet stuk
- C. Barcode sticker
- D. Glas of mok
(niet meegestuurd)
- E. Safety bag

URINE AFNAME

Instructie voor urine afname.
Lees deze instructie goed!

2 Zo doe je de test

1. Ga naar het toilet en vang je eerste straal urine op in een glas of mok. Plas de rest uit in het toilet.
2. Haal de buis met gele dop uit de verpakking. Besticker het met de **gele sticker** voor **urethrale afname**.
3. Draai het bovenste dopje van de buis, bewaar deze goed en plaats het bijgevoegde gele opzetstuk op het uiteinde, zodat er een spuit ontstaat.
4. Plaats nu de spuit in de opgevangen urine en trek vervolgens aan de witte achterzijde van de spuit, zodat er 10ml urine opgezogen wordt.
5. Trek de witte achterzijde van de spuit zo ver uit, totdat je niet meer verder kan en breek dan af.
6. Houd de spuit rechtop, haal het gele opzetstuk van de spuit en draai het bovenste dopje terug.
7. Controleer nogmaals of de buis de juiste sticker bevat. Plaats daarna de buis in de bijgevoegde safetybag. Ga eventueel door naar de volgende afname.