


# SCHURFT

Instructie voor schurft afname.  
Lees deze instructie goed!

## 1 Dit heb je nodig

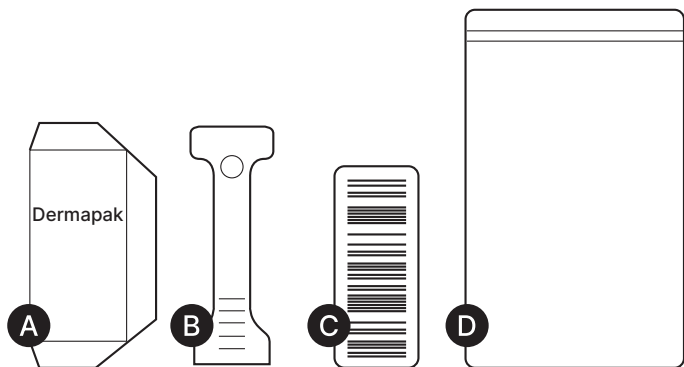

- A. Dermapak
- B. Plastic krabbertje

- C. Barcode sticker
- D. Safety bag

# SCHURFT

Instructie voor schurft afname.

Lees deze instructie goed!

## 2 Zo doe je de test

1. Pak de “dermapak” en besticker het met de **mintgroene sticker** waarop staat: **huid afname | schurft**.
2. Leg de dermapak op een vlakke ondergrond en vouw de transparante plastic flap helemaal open.
3. Schraap vervolgens met het plastic krabbertje langs de aangedane huid. Zorg dat je de direct loskomende huidschilfers opvangt op het zwarte papier van de dermapak. Schurft zit vaak aan de vingers, de binnenzijde van de polsen, op de ellebogen en in de voorste okselplooi. Enkele huidschilfers zijn voldoende.
4. Plak de randen van de dermapak dicht.
5. Controleer nogmaals of de dermapak de juiste sticker bevat. Plaats daarna de dermapak in de bijgevoegde transportverpakking. Ga eventueel door naar de volgende afname.